

PRELEVEMENTS GYNECOLOGIQUES : Quel écouvillon ?

Bactério standard :

+ PCR Chlamydiae/Gono :

+ Mycoplasme :

+ Virus :

1 Rouge + 1 Bleu

+ 1 Milieu Transport Rose

+ 1 Milieu Transport Rouge 1 ml

+ 1 Milieu Transport Rouge 3 ml

Préférence
sur
Endocol

Bouchon ROUGE



SANS milieu de conservation

Écouvillon pour examen direct de prélèvement vaginal et Recherche de trichomonas vaginalis

ATTENTION : La recherche de trichomonas ne peut s'effectuer que sur un prélèvement < 2 heures

BOUCHON BLEU




AVEC Milieu de conservation

Écouvillon pour mise en culture de prélèvement vaginal et recherche de streptocoque du groupe B




Écouvillon pour la recherche par PCR des Chlamydia et gonocoques

ATTENTION : Milieu avec bouchon ROSE

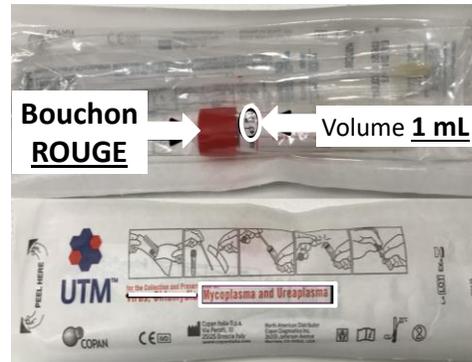

Écouvillon pour la recherche de mycoplasme urogénitaux (culture ou PCR)

ATTENTION : Milieu avec bouchon ROUGE, volume 1ml

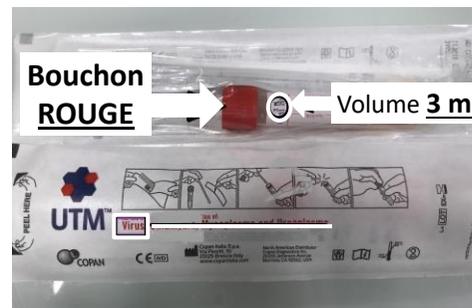

Écouvillon pour la recherche de virus HERPES (envoi laboratoire extérieur)

ATTENTION : Milieu avec bouchon ROUGE, volume 3 ml